



Kickstarta läkningsprocessen

kliniska bevis pekar ut MEDIHONEY med aktiv Leptospermum-honung som förstahandsvalet vid avstannad läkningsprocess ^{1,2,3,4}

HCS



NYHET



WOUND & BURN DRESSING

MEDIHONEY®

with Active *Leptospermum* Honey



Aktiv Leptospermumhonung gör skillnaden för både Dig och Dina patienter

SNABBFAKTA:

- 1 Kontrolleras mot en strikt upp
sättning av system och stan-
darder. Måste uppvisa samma
konsistens och egenskaper
oavsett batch.
- 2 Standardiserade ratingsys-
tem för att kvantifiera graden
av UMF (Unique Manuka Factor)
- 3 Steriliseras med gammastrål-
ning, förstör alla bakteriesporer,
utan förlust av produktens ef-
fektivitet.^{5, 6}
- 4 Kommer från en spårbar källa
och är fri från pesticider och
antibiotika.

VAD ÄR AKTIV LEPTOSPERMUMHONUNG?

- Sårvårdshonung med flest publicerade studier
- Manukahonung som är utvunnen ur nektar från Leptospermumväxter har bättre antibakteriella egenskaper än andra honungstyper
- Är unik för att den bibehåller sin effektivitet i såret
- Är den enda honungsart som i kontrollerade studier har effekt på sår som har stagnerat ^(1, 2, 3, 4)
- Manukahonung är bättre än Hydrogel på venösa bensår efter 4 veckor ⁽²⁾

HUR HJÄLPER MEDIHONEY TILL ATT FRÄMJA LÄKNING?


- Underlättar debridering av död vävnad i såret genom osmos ⁽⁵⁾
- Sänker sårets pH-värde ^(6,7)
- Luktreducerande samt ger en fuktighetsbevarande sårmiljö.
- Kliniskt dokumenterad effekt mot ett brett spektrum av bakterier inklusive antibiotikaresistenta organismer (MRSA, VRE, Pseudomonas)
- Hämmar bakterietillväxten
- Stimulerar granulationen och epiteliseringsprocessen
- Finns i en mängd beredningsformer

INDIKATIONER


AKUTA OCH SVÅRLÄKTA SÅR, INFEKTERADE SÅR, TRYCKSÅR,
BENSÅR, DIABETESSÅR, NEKROTISKA SÅR, ONKOLOGISKA SÅR.
FÖRSTA- OCH ANDRAGRADENS BRÄNNSKADOR.

Osmotisk aktivitet och pH-modulation

nyckeln till förberedelse av sårbädden
och helande progression

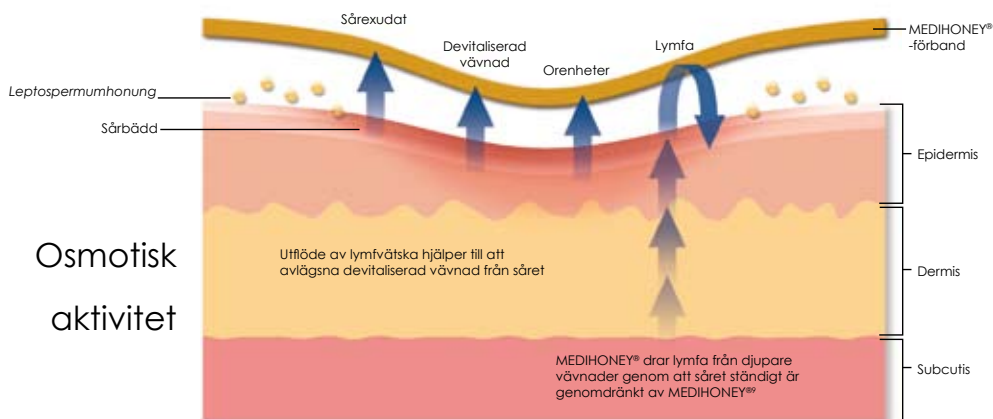

Modulation
av pH-värdet

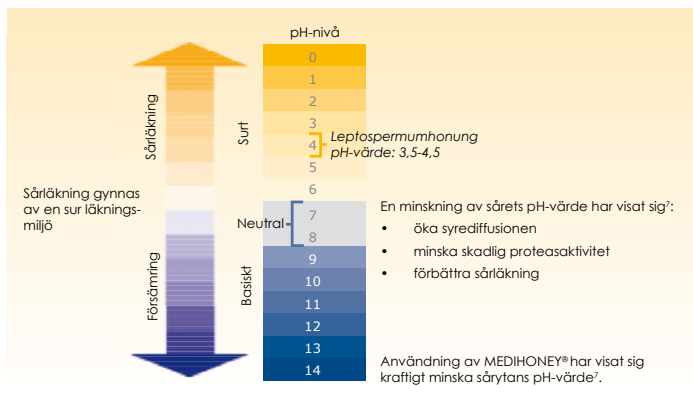

MEDIHONEY® är förstahandsvalet när det gäller sårvård för t.ex. avstannade sår

POSTOPERATIVT SÅR

Paul Liguori, MD and Kim Peters, RN, CWS: Case #1 of 8 presented at 2008 WUWH

- Rupturerade bröstfläksoperation
- Avstannade framsteg under NPWT

MEDIHONEY®-BEHANDLING ORDINERADES

- Snabb läkning noteras efter de förstadagliga applikationerna
- Komplet sårslutning uppnådes vecka 3 i behandlingen med MEDIHONEY®



Avstannade rupturerade post-opsår



Vecka 3 efter MEDIHONEY®-behandling

AVSTANNAT VENÖST BENSÅR

Matthew Regulski, DPM: Case #3 of 8 presented at 2008 SAWC

- Som inte läkte under kompressionsbehandling + alginatförband

MEDIHONEY®-BEHANDLING ORDINERADES

- Fortsatt kompressionsbehandling
- Såret läkte inom 28 dagar



Avstannad läkning, smärtsamt. Efter 12 veckors kompressionsbehandling.



Efter 3,5 veckors kompressionsbehandling med MEDIHONEY®.

Effektiv på flera olika etiologier

bidrar till att göra sårbehandlingen lätt

PYODERMA GANGREONIUM

Catherine T. Milne, APRN, MSN, CWOCN: Case #3 of 3 presented at 2008 SAWC & WOCN

- Två sår behandlades på olika sätt. Ett med systemiska steroider, lätt komprimering, med alginat förband för att minska ödemet. Det andra såret behandlas med MEDIHONEY®-alginat.

MEDIHONEY®-BEHANDLING ORDINERADES

- Efter 2 veckors behandling med MEDIHONEY® hade såret minskat med 62%.
- Efter 3 veckor hade såret som behandlades med MEDIHONEY® läkt, och det andra såret ordinerades behandling med MEDIHONEY®. Läkt efter 4 veckor.



MEDIHONEY® till vänster, vanlig alginat till höger



3 veckor efter behandling av de två olika tillvägagångssätten

MOTSTRÄVIGA DIABETESFOTSÅR

Steven J. Kavros, DPM: Case #1 of 3 presented at 2008 SAWC

- Perifer neuropati, ESRD.
- Tät fibrinvävnad, gulsmetigt, och begränsad granulationsvävnad vid första besöket

MEDIHONEY®-BEHANDLING ORDINERATS

- Omläggning, varannan dag.
- Sårytan minskade med 25% efter 4 veckor, och med 85% efter 8 veckor. Såret läkt efter 16 veckor.



Avstannad läkning - diabetesår



Efter 8 veckors behandling med MEDIHONEY®



WOUND & BURN DRESSING

MEDIHONEY®
with Active *Leptospermum Honey*

Finns i en mängd olika produktkonfigurationer för att hantera flera sårtyper

Dermakräm



30%

Dermakrämen innehåller 30% Medihoney antibakteriell medicinsk honung. Dermakrämen kan användas på stora hudområden och under kompression eller sårförband för att skydda intakt hud från nedbrytning och irritation på grund av torr hud eller friktion.

Barriärkräm



30%

Barriärkrämen innehåller 30% Medihoney antibakteriell medicinsk honung. Barriärkrämen används på intakt och utsatt hud för att skydda mot vätska och fukt. Kan appliceras runt sår, hudveck och inkontinensskydd där en skyddande barriär förhindrar hudskador.

Sårhonung



100%

MEDIHONEY® patientbundna engångstuber är kliniskt bevisat effektiv för att skapa en antibakteriell miljö. MEDIHONEY® är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive antibiotikaresistenta organismer.

INDIKATIONER

- Svårårläta sår
- Nekrotiska sår
- Infekterade sår
- Gulsmetiga sår
- Trycksår
- Venösa bensår
- Diabetessår

Sårgel




80%

MEDIHONEY® patientbundna engångstuber är kliniskt bevisat effektiv för att skapa en antibakteriell miljö. MEDIHONEY® är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive antibiotikaresistenta organismer.

Indikationer

- Svårårläta sår
- Nekrotiska sår
- Infekterade sår
- Gulsmetiga sår
- Trycksår
- Venösa bensår
- Diabetessår

Apinate

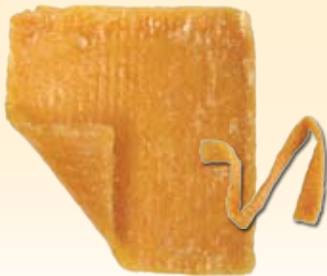

Kalciumalginat indränkt med antibakteriell Leptospermumhonung (Manuka). Skyddar känslig vävnad. Innehåller 95% honung.

INDIKATIONER

- Benskär
- Trycksår
- Infekterade sår
- Diabetessår
- Gulsmetiga sår
- Nekrotiska sår

95%

Tulle



Ikke vidhäftande acetatförband med 85% Manukahonung (Leptospermum). Vårt 3-lags Tulle™ honungsförband skapar en mikromiljö som stödjer läkning och ger en antibakteriell barriär.

INDIKATIONER

- Trycksår
- Infekterade sår
- Nekrotiska sår
- Transplantations sår
- Diabetessår
- Gulsmetiga sår
- Första och andra gradens brännskador
- Benskär

85%

Gel sheet



MEDIHONEY® Gel Sheet är steril, ikke vidhäftande sårförband bestående av MEDIHONEY® antibakteriell honung (80%) och natriumalginat för sårvård (20%). Förbandet blir till gel när den värms upp av kroppstemperaturen varvid ett annat skyddande förband är nödvändigt ovanpå.

INDIKATIONER

- Trycksår
- Nekrotiska sår
- Infekterade sår
- Extern fixation (Pin-Site)
- Gulsmetiga sår

80%

HCS



NYHET

MEDIHONEY® HCS (Hydrogel Colloidal Sheet) innehåller 63% Antibakteriell Leptospermum Manukahonung. Förbandet hjälper till att bibehålla fuktig miljö, som gynnar sårsläkningen. För torra till måttligt våtskande sår. HCS finns både som vidhäftande och ikke vidhäftande förband.

INDIKATIONER

- Diabetessår
- Benskär
- Trycksår grad (I-IV)
- Första och andra gradens brännskador
- Operationssår
- Traumatiska sår

63%

Produktsortiment

Art.nr	Artikel	Strik	Ant./enh.
398	Medicinsk sårvårdshonung 100%	20g.	5-pack
405	Medicinsk sårvårdshonung 100%	50g.	1-pack
395	Medicinsk sårvårdshonung gel 80%/20%	20g.	5-pack
793	Medicinsk sårvårdshonung Alginat	1,9 x 30 cm	5-pack
794	Medicinsk sårvårdshonung Alginat	5 x 5 cm	10-pack
795	Medicinsk sårvårdshonung Alginat	10 x 10 cm	5-pack
796	Medicinsk sårvårdshonung Tulle	10 x 10 cm	5-pack
798	Medicinsk sårvårdshonung Gel sheet	5 x 5 cm	10-pack
799	Medicinsk sårvårdshonung Gel sheet	10 x 10 cm	10-pack
780	Medicinsk sårvårdshonung HCS (ej vidhäftande)	6 x 6 cm	10-pack
781	Medicinsk sårvårdshonung HCS (ej vidhäftande)	11 x 11 cm	10-pack
782	Medicinsk sårvårdshonung HCS (vidhäftande)	7,2 x 7,2 cm (fästytta 11 x 11 cm)	10-pack
783	Medicinsk sårvårdshonung HCS (vidhäftande)	7,15 x 11,5 cm (fästytta 15 x 15 cm)	10-pack


Steril	Ja - Gammabestrålad
Förvaring	Under 25°C
Normer	ISO 13485:2003 EU-direktiv 93/42/EEC Klass IIb Steril

Kontraindikationer: Personer med allergi mot honung och/eller alginat kan reagera på produkten.

Observera: Vissa patienter erfår smärta vid behandling med honung i sår. Vid varaktig smärta avbryt behandlingen och skölj såret rent med 0,9% NaCl-lösning.

MIC of 127 drug-resistant clinical isolates (1990-2004)

Narelle Georg, Qld Health Pathology and Scientific Services, Royal Brisbane Hospital/Bacteria Minimum Inhibitory Concentration (MIC).

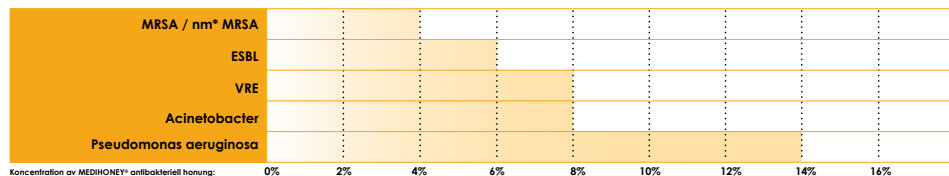

STUDIER:

1. The Use of MEDIHONEY on surgical wounds post-CABG. Bateman S, Graham T (2007) WOUNDS UK. Vol 3, 75-83
2. Leptospermum scoparium Honey vs. Hydrogel to debride venous ulcers: A randomised controlled trial. Gethin G, EWMA 2007.
3. Chronic lower extremity venous ulceration - Use of a Leptospermum honey impregnated alginate to facilitate wound closure. Regulski M, SAWC 2008.
4. Wound care with MEDIHONEY in paediatric haematology- oncology. Simon A, Sofka K, Wszniewsky G, Blaser G, Bode U, Fleischhack G. (2006) Supportive Care in Cancer. 14, (1): 91-7.
5. Georg N. Cutting KF Antibacterial Honey: in-vitro Activity Against Clinical Isolates MRSA, VRE, and other Multiresistant Gramnegative Organisms. Wounds 2007; 19 (9): 231-236
6. Gethin G, Cowman S. Case series of use of Manuka honey in leg ulceration. Int Wound J. 2005; 2(1): 10-15
7. Gethin G, Cowman S. The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of chronic wounds. Int Wound J. 2008; 5: 185-194
8. Lusby PE, Coombes A, Wilkinson JM. Honey: A potent agent for wound healing? J Wound Ostomy Continence Nurs. 2002; 29(6): 295-300
9. Van der Weyden EA. The use of honey for treatment of two patients with pressure ulcers. Br J Community Nurs. 2003; 8(12)(suppl.): S14- S20
10. Molan P. The evidence supporting the use of honey as a wound dressing. Int J Low Extrem Wounds. 2006; 5(1): 40-54



Salubrious
Good Medical

AAA

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75
e-post: info@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se